

LYSONOX[®] AP

Visok nivo dezinfekcije

LYSONOX[®] AP je dezinfekciono sredstvo visokog nivoa i hladni hemijski sterilišući proizvod, na bazi aktivirajuće persirćetne kiseline, za medicinska/hirurška sredstva, endoskopsku opremu i za sva termolabilna medicinska sredstva.

Sastoji se iz baze i aktivatora koji se mešaju pri upotrebi proizvoda. Rezultujući rastvor poseduje odličnu kompatibilnost materijala, uključujući najosetljivije materijale (npr. optički sistemi).

POSEBNA SVOJSTVA

- Do delovanja dolazi maksimum 2 min. nakon što se pomešaju komponente (aktivator + baza)
- Visoka kompatibilnost sa materijalima
- Može da se koristi ručno i u automatskim uređajima za pranje i dezinfekciju (npr. EWD)
- Predviđeno za sve potrebe u operativnim uslovima
- Stabilnost aktivnog rastvora: 14 dana / 65 ciklusa
- Test trake za proveru % m/v koncentracije persirćetne kiseline.
- Brzo: opseg kontaktnog vremena od 5 min. do 10 min. (maks.)

PRIMENA I DOZIRANJE

Dezinfekcija visokog nivoa	Spremno za upotrebu (nakon aktivacije)	5 minuta
Sterilizacija hladnim hemijskim sredstvima	Spremno za upotrebu (nakon aktivacije)	10 minuta

KAKO SE KORISTE TEST TRAKE

- Traku držati umočenu u trajanju od 1 s.
- Izvadite je i brzo je protresite.
- Rezultat je vidljiv kroz 10 s.



Boja: **plava-siva-crna**
Aktivan rastvor



Bez boje
Nije aktivan

