

# LYSONOX<sup>®</sup> INSTRUMENTS

## Multi-enzimski čistač instrumenata

Više-enzimski deterdžent i predezinficijens nove generacije za hirurške instrumente i medicinska sredstva, uključujući opremu za endoskope.

**Lysonox<sup>®</sup> INSTRUMENTS** je koncentrovani rastvor sa veoma efikasnim biocidnim kompleksom, kombinovanim sa inkapsuliranom enzimatском mešavinom koja se odlikuje visokom stabilnošću tokom vremena. Proizvod 2u1 (predezinficijens i deterdžent) širokog spektra, bez hlora, alkohola, fenola ili aldehida, koji pruža veliku kompatibilnost sa materijalima. Zahvaljujući neutralnoj pH vrednosti razređenog rastvora, Lysonox<sup>®</sup> INSTRUMENTS se može koristiti kod osetljivih materijala, uključujući čitav opseg oreme za endoskope.

### POSEBNA SVOJSTVA

- Stopa uništenja biofilma od 8 log, u saglasnosti sa međunarodnim standardom ASTM, protiv biofilma koje proizvodi *Pseudomonas Aeruginosa*
- Neutralna pH
- Inkapsulirano enzimski kompleks (EPE sistem)
- Može da se koristi i u kadama za potapanje i ultrazvučnim kadama
- Stabilnost razređenog rastvora (otvoreni kontejner): 24 časa
- Skladištenje prljavih instrumenata i stabilnost seta (zatvoreni kontejner): 72 časa
- Bezbedno za korišćenje (bez CMR-a)
- Sprečava oksidaciona i korozivna dejstva

### PRIMENA I DOZIRANJE

Dekontaminacija i čišćenje hirurških instrumenata	Doza: 0,5 % (25 ml u 5 l hladne vode)	5 minuta
Dekontaminacija i čišćenje ultrazvučnih kada	Doza: 0,5 % (25 ml u 5 l hladne ili tople vode)	5 minuta
Set prljavih instrumenata	Doza: 0,5 % (25 ml u 5 l hladne vode)	5 - 15 minuta
Dekontaminacija i čišćenje opreme za endoskope	Doza: 0,5 % (25 ml u 5 l hladne vode)	5 - 15 minuta

