

LYSONOX® PULVER AP

3u1 proizvod

Dezinficijens, deterdžent i hladni hemijski sterilišući proizvod, koji razvija persirćetnu kiselinu, za visok nivo dezinfekcije hirurških instrumenata, opremu za endoskope i termolabilna medicinska sredstva.

Lysonox® PULVER AP je proizvod u obliku pudera koji u obliku rastvora poseduje 3 aktivnosti u jednom proizvodu. Lysonox® PULVER AP je kako deterdžent visokog učinka – zahvaljujući svom enzimskom kompleksu – tako i sredstvo za primenu pre dezinfekcije hirurških instrumenata, kao i dezinficijens visokog nivoa (hladna hemijska sterilizacija) za sva termolabilna medicinska sredstva (npr. fleksibilni endoskopi). Zahvaljujući razvijenoj persirćetnoj kiselini, Lysonox® PULVER AP ima čitav spektar dejstva, koji može da se koristi na osnovu koncentracije i potreba pri operaciji.

POSEBNE KARAKTERISTIKE

- 3 proizvoda u 1: deterdžent, sredstvo za primenu pre dezinfekcije i visok nivo dezinfekcije
- Enzimsko kompleksno jedinjenje, bez perborata
- Visoka kompatibilnost sa materijalima
- Trajna generacija aktivnog kiseonika (sistem aktivnog kiseonika)
- Može da se koristi pri ručnom pranju i u ultrazvučnim kadama
- Namenjena za sve vrste potreba pri operacijama
- Stabilnost razblaženog rastvora: 48-72 časa
- Test trake za proveru % m/v koncentracije persirćetne kiseline.
- Brzo kontaktno vreme između 5 min. to 10 min. (maks.)
- Stabilnost skladištenog proizvoda (kada se ne koristi): 3 godine

PRIMENA I DOZIRANJE

Primarna primena pre dezinfekcije i čišćenje medicinskih uređaja	Doza: 1 % (1 X 20 g-merica svaka 2 L vode)	5 minuta
Dezinfekcija i čišćenje u ručnim i ultrazvučnim kadama	Doza: 2 % (2 X 20 g-merica svaka 1 L voda)	5 minuta
Dezinfekcija i čišćenje sa sporadičnom aktivnošću	Doza: 2 % (2 X 20 g-merica svaka 1 L voda)	10 minuta



 Sistem aktivnog kiseonika