

# LYSONOX<sup>®</sup> N

## Automatsko reprocesiranje instrumenata

Tečni agens sa neutrališućim dejstvom i dejstvom čišćenja za uređaje za pranje i dezinfekciju i automatske mašine, za reprocesiranje medicinskih sredstava i laboratorijskih predmeta od stakla.

**Lysonox<sup>®</sup> N** je tečni agens koji se sastoji iz organskih kiselina sa neutrališućim i dejstvom čišćenja, specifičan po tome što neutrališe alkalne ostatke i što se koristi po potrebi za kiselo pretpranje kod uređaja za pranje i dezinfekciju. Lysonox<sup>®</sup> N ne sadrži fosfor i stoga obezbeđuje visok stepen zaštite čak i kod najosetljivijih materijala.

### POSEBNA SVOJSTVA

- Snažno dejstvo neutralizacije alkalnih ostataka i ostataka rastvorivih u kiselini
- Odlična kompatibilnost sa različitim tipovima materijala
- Nije agresivan zahvaljujući organskim kiselinama
- Helatni agensi minerala
- Kontrola pene
- Bez fosfora
- Bez EDTA, NTA i surfaktanata
- Preporučuje se kada god nije poželjno da se ostaci fosforne kiseline nalaze na površinama
- Izričito se preporučuje za korišćenje kako kod medicinskih sredstava tako i kod laboratorijskih staklenih predmeta

### PRIMENA I DOZIRANJE

Korišćenje u uređajima za pranje i dezinfekciju	Doza 1-2 ml/L (0,1- 0,2%)	35 – 70 °C
Korišćenje u uređajima za kiselo pretpranje	Doza 2-6 ml/L (0,2- 0,6%)	40 – 55 °C

