

### OPIS

Elastični zavoj za fistulu sa dvoslojnim visoko upijajućim jastučićem i lepkom za bolju čvrstoću. Pogodan i za pacijente kojima je potrebna intravenska terapija i transfuzija krvi.

### PREDVIĐENA UPOTREBA

Previjanje nakon dijalize kako bi se zaustavilo krvarenje nakon uklanjanja igle iz fistule.

### NAMENA

Dizajnirano da zaustavi krvarenje i smanji rizik od hemoragije zahvaljujući kompresiji na mestu uboda. Deluje i kao barijera protiv rizika od infekcija.

Biokompatibilni sloj na jastučetu se ne lepi za kožu, čime se **izbegava skidanje ugruška i rizik od krvarenja.**

Pamučni zavoj ne stvara senzibilizaciju zbog lepka.



### UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1

Odmotajte prvi deo zavoja koji sadrži jastučić.



2

Stavite jastučice preko ubodnog mesta.



3

Zategnite zavoj dovoljno da zaustavite krvarenje.



4

Uklonite zaštitni film i pričvrstite zavoj lepkom.

