

OPIS

EMOSTAN ALG je višeslojni hemostatski jastučić za fistule na bazi kalcijum alginata.

PREDVIĐENA UPOTREBA

Za upotrebu kod svih pacijenata sa problemima hemostaze, u cilju zaustavljanja krvarenja vaskularnog pristupa.

Ova grupa pacijenata može obuhvatati: starije pacijente, pacijente sa dijabetesom, osobe sa nedostatkom vitamina K, pacijente koji se leče heparinom ili varfarinom, pacijente koji pate od bolesti jetre, pacijente sa nekom naslednom bolešću (kao što su hemofilija i Von Vilebrandova bolest), gojazne pacijente.


NAMENA

- Kontrola krvarenja kod pacijenata koji su na dijalizi.
- Ubrzavanje hemostaze.
- Pogodno za smanjenje krvarenja zahvaljujući kontinuiranoj kompresiji na mestu uboda iglom.

LAKA PRIMENA

1. Stavite jastučić na ruku preko mesta uboda.
2. Izvucite iglu i držite jastučić na mestu uz održavanje odgovarajućeg pritiska tokom potrebnog vremenskog perioda, dovoljno dugo da obezbedite značajno smanjenje protoka krvi.
3. Skinite **EMOSTAN ALG** najkasnije 4 sata nakon postavljanja i stavite primarnu oblogu, na primer zavoj ili flaster.

Poređenje sa standardnim zavojima

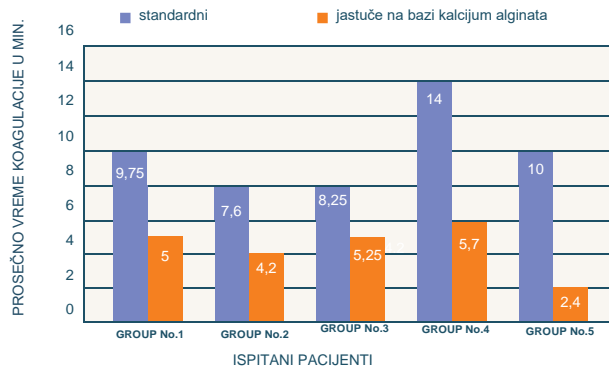

Poređenje sa standardnim zavojima pokazalo je da zavoji na bazi kalcijum alginata smanjuju vreme izlečenja u **85.6% slučajeva**.

UPOZORENJA I MERE PREDOSTROŽNOSTI

- Koristite samo za predviđenu upotrebu.
- Skinite kada se postigne hemostaza, najkasnije 4 sata nakon postavljanja.
- Da biste skinuli oblogu i u slučaju da se jastučić osuši na rani, sredstvo se mora rehidrirati fiziološkim rastvorom.
- Nakon toga, obloga se lako može skinuti sa rane bez povrede.
- Sredstvo ima hemostatsku funkciju, ne zamenjuje primarno previjanje.

