

EXIT-PRO® AG

OPIS

EXIT-PRO® je upijajuća obloga sa nelepljivim filmom koji oslobađa jone srebra i prorezom za izlaz katetera na prozračnoj lepljivoj podlozi od dve vrste materijala:


- netkani materijal (NW)
- transparentni poliuretan (PU)

PREDVIĐENA UPOTREBA


- Koristi se kao obloga na mestu umetanja vaskularnih i nevaskularnih perkutanih sredstava i kao mehanička barijera za kompresiju i apsorpciju eksudata.
- Ne zahteva sekundarne zavoje.
- Kompatibilno sa svim tipovima standardnih katetera.

NAMENA

- Film na bazi srebra garantuje trenutnu i dugotrajnu antibakterijsku efikasnost, do 7 dana. Pomaže smanjenje rizika od infekcije usled upotrebe perkutanih sredstava.
- Sprečava crvenilo kože uzrokovano mehaničkim delovanjem katetera.
- Za pacijente sa hipertermijom ili hiperhidrozom preporučuje se model na netkanom materijalu.

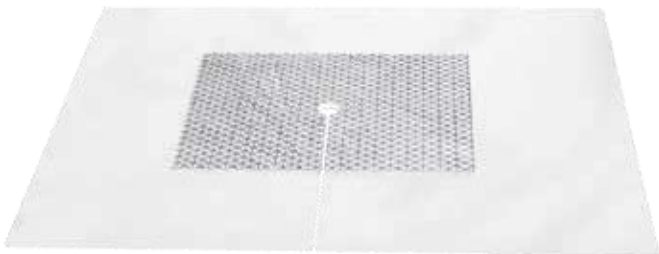

Eksperimentalni dokazi antibakterijskog delovanja

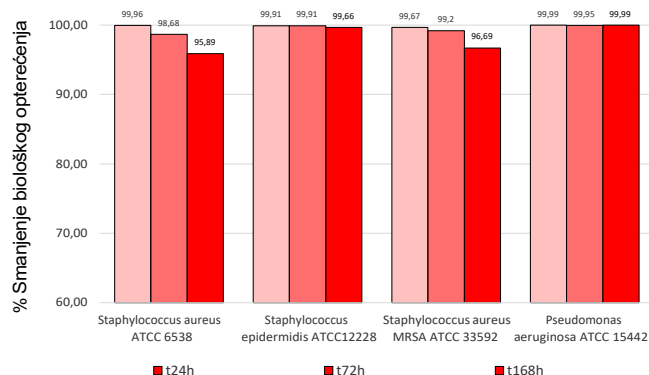

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Dezinfikujte izlazno mesto i ostavite da se potpuno osuši.
2. Stavite jastuče preko kože na izlaznom mestu, tako da kraj katetera izađe kroz otvor i fiksirajte ga pritiskom na samolepljive ivice.
3. Uklonite zaštitni papir sa poledine flastera (samo za model sa PU samolepljivim delom).
4. Zamenite **EXIT-PRO®** pri svakom tretmanu ili svaki put kada se pokvasi, zaprlja ili kada treba pregledati izlazno mesto.

