

OPIS

EXIT-PRO® AG SoftTouch je upijajuća nelepljiva obloga koja oslobađa jone srebra na podlozi od netkanog materijala (NW) sa „SoftTouch“ adhezivnom tehnologijom.

PREDVIĐENA UPOTREBA

- Koristi se kao obloga na mestu umetanja vaskularnih i ne vaskularnih perkutanih sredstava i kao mehanička barijera za kompresiju i apsorpciju eksudata.
- Nije potrebno sekundarno previjanje.
- Kompatibilno sa svim tipovima standardnih katetera.

NAMENA

Obloga ima potpunu zaštitno delovanje:

- **film koji oslobađa jone srebra:** garantuje trenutnu i dugotrajnu antibakterijsku efikasnost do 7 dana, i pomaže smanjenje rizika od infekcija koje su povezane sa upotrebom perkutanih uređaja;
- **podloga sa adhezivnom tehnologijom „SoftTouch“:** štiti kožu od mehaničkih oštećenja izazvanih uklanjanjem lepljivih obloga (kao posledica ponovljenih tretmana), i pomaže obnovu tkiva. Deluje terapijski i preventivno na povrede kože koje su povezane sa upotrebom medicinskog lepka.;
- sprečava pojavu crvenila i iritacije kod produžene primene flastera;
- optimalno rešenje za pacijente koji su skloni suvoj ili perutavoj koži, što je karakteristično za pacijente na dijalizi ili onkološkim tretmanima.

Delikatnost SoftTouch lepka se kombinuje sa antibakterijskim i preventivnim dejstvom srebra.


Idealno za hronične pacijente ili pacijente sa osetljivom kožom.



Tradicionalni lepak ili SoftTouch?


Tradicionalni lepak

ne prijanja ravnomerno na kožu, već ostavlja džepove na površini koji se naknadno popunjavaju. Koža je zategnuta, što čini fiksiranje jačim i pogodnim za jednokratne tretmane.

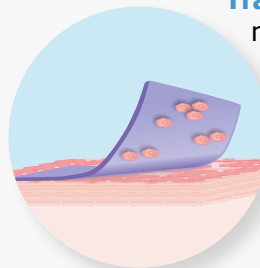

Kod SoftTouch lepka,

prijanjanje na kožu je ravnomerno, a koža nije previše zategnuta. Skidanje je manje traumatično, što ovaj tip lepka čini idealnim za ponovljene tretmane ili za delikatnu i osetljivu kožu.

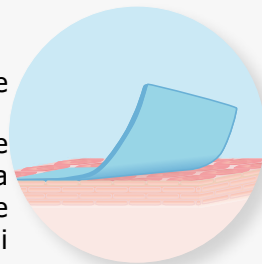

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Dezinfikujte izlazno mesto i pustite da se potpuno osuši.
2. Podignite dve ivice zaštitnog papira flastera.
3. Stavite jastuče sredstva **EXIT-PRO® AG SoftTouch** preko kože na izlaznom mestu, tako da kraj perkutanog uređaja izađe iz pripremljenog otvora, i fiksirajte ga nežnim pritiskom.
4. Zamenite **EXIT-PRO® AG SoftTouch** pri svakom tretmanu ili svaki put kada se pokvasi, zaprlja ili je potrebno pregledati izlazno mesto.