

OPIS

EXIT-POCKET® AG je sredstvo za zaštitu izlaznog mesta katetera koji se sastoji od upijajućeg jastučića sa nelepljivim filmom koji oslobađa jone srebra, izreza za prolaz i džepa za držanje lumena.

PREDVIĐENA UPOTREBA

- Koristi se kao obloga na mestu umetanja vaskularnih i nevaskularnih perkutanih sredstava i kao mehanička barijera za kompresiju i apsorpciju eksudata.
- Ne zahteva sekundarne obloge.
- Kompatibilan sa svim tipovima standardnih katetera


INDIKACIJE

Posebna konfiguracija sredstva ima više funkcija:

- **zaštita od infekcija:** film na bazi srebra garantuje trenutnu i dugotrajnu antibakterijsku efikasnost, do 7 dana. Pomaže smanjenje rizika od infekcije povezanih sa upotrebom perkutanih sredstava;
- zaštitni džep izoluje lumen od spoljašnje sredine i omogućava potpunu zaštitu lumena perkutanih sredstava od moguće mikrobnog kontaminacije i sprečava crvenilo kože uzrokovano mehaničkim delovanjem katetera;
- lepljivi sloj koji se može repositionirati olakšava manevar otvaranja/zatvaranja džepa, omogućavajući njegovo fiksiranje između tretmana dijalize, ukoliko nema potrebe za zamenom zavoja.



Eksperimentalni dokazi antimikrobnog delovanja

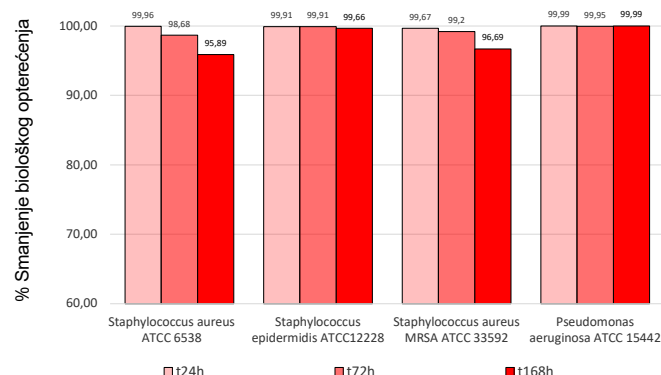

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Dezinfikujte izlazno mesto i pustite da se potpuno osuši.
2. Otvorite džep tako što ćete odvojiti dve gornje ivice.
3. Uklonite zaštitni papir sa jastučeta podizanjem slobodnog krilca.
4. Stavite jastučice **EXIT-POCKET®** preko izlaznog mesta tako da kraj katetera prođe kroz izrez i nežno pritisnite lepljivu ivicu oko jastučeta kako biste ga fiksirali za kožu.
5. Ubacite lumen u džep.
6. Uklonite zaštitni papir sa dela na kom se nalazi krilce i zatvorite džep fiksiranjem lepljive ivice.
7. Zamenite **EXIT-POCKET®AG** pri svakom novom tretmanu ili svaki put kada se pokvasi, zaprlja ili kada treba pregledati izlazno mesto.