

# EMOSTAN®

## OPIS

**EMOSTAN** je visoko upijajući jastučić sa kompresivnim hemostatskim dejstvom, posebno namenjen za negu arteriovenskog pristupa nakon uklanjanja igle iz fistule po završetku dijalize.

Takođe je pogodan za pacijente kojima je potrebna intravenska terapija i transfuzija krvi.

## PREDVIĐENA UPOTREBA

Previjanje nakon dijalize kako bi se zaustavilo krvarenje nakon uklanjanja igle iz fistule.

## NAMENA

Dizajniran da zaustavi krvarenje i smanji rizik od hemoragije zahvaljujući kompresiji na mestu uboda. Deluje kao barijera protiv rizika od infekcije. Biokompatibilni sloj na jastučiću se ne lepi za kožu i **garantuje skidanje bez traume**.



## Jastučće za fistule

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU



1  
Stavite jastučić preko ubodnog mesta i držite ga palcem.



2  
Izvučite iglu i pritisnite mesto uboda u odgovarajućem intervalu kako biste zaustavili krvarenje.