

## OPIS



**EXIT-PAD® AG** je upijajuća obloga sa nelepljivim filmom koji oslobađa jone srebra, sa otvorom za izlaz katetera.

## PREDVIĐENA UPOTREBA


- Koristi se kao obloga na mestu umetanja vaskularnih i nevaskularnih perkutanih sredstava i kao mehanička barijera za kompresiju i apsorpciju eksudata.
- Kompatibilno sa svim tipovima standardnih katetera.

## NAMENA

- Film na bazi srebra garantuje trenutnu i dugotrajnu antibakterijsku efikasnost, do 7 dana. Pomaže smanjenje rizika od infekcije usled upotrebe perkutanih sredstava.
- Sprečava crvenilo kože uzrokovano mehaničkim delovanjem katetera.

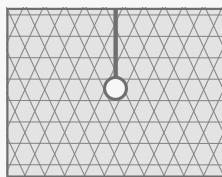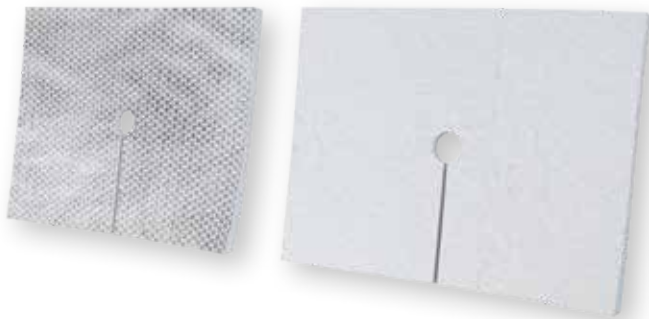


PROREZ I OTVOR

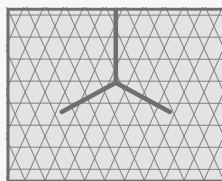

IZREZ

## Ekperimentalni dokazi antibakterijskog delovanja

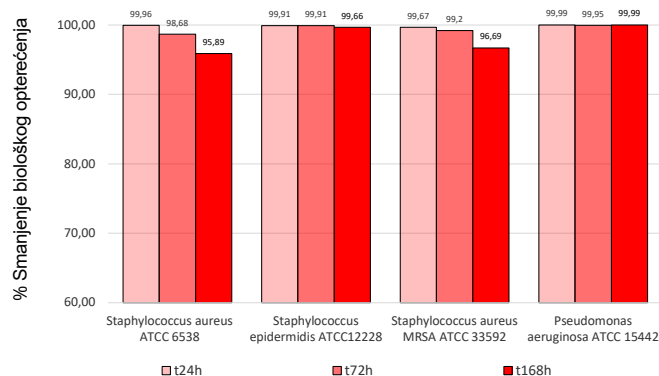

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Dezinfikujte izlazno mesto i pustite da se potpuno osuši.
2. Stavite stranu sredstva **EXIT-PAD® AG** koja sadži srebro preko kože na izlaznom mestu, tako da kraj katetera izađe kroz izrez i fiksirajte ga flasterom ili sterilnim zavojem.
3. Zamenite **EXIT-PAD® AG** pri svakom novom tretmanu, svaki put kada se pokvasi, zaprlja ili je kada je potrebno pregledati izlazno mesto.