

OPIS

BETAFIX[®] je elastični zavoj sa nelepljivim filmom koji oslobađa jone srebra i koji na jednom kraju ima lepak za fiksiranje.

PREDVIĐENA UPOTREBA


- Kompresivno hemostatsko dejstvo na arteriovenske fistule
- Zadržavanje eksudata po završetku dijalize, intravenskih terapija, transfuzije krvi.
- Zaštita vaskularnog pristupa u periodu nakon tretmana.

NAMENA

- Film koji oslobađa jone srebra garantuje trenutnu i dugotrajnu antibakterijsku efikasnost, pomažući smanjenje rizika od infekcije.
- Smanjuje znake upale usled ponavljanih venepunkcija, kao na primer kod arteiovenskih fistula (AVF).
- Sprečava formiranje eshara i čini sledeću venepunkciju manje traumatičnom za pacijenta.
- Podstiče regeneraciju kože.



Eksperimentalni dokazi antibakterijskog delovanja

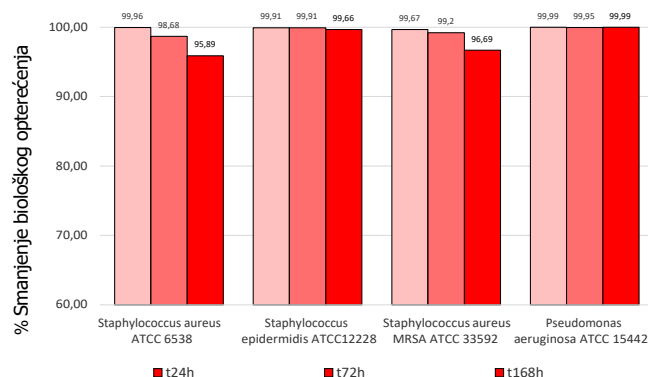

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Nakon uklanjanja igle i smanjenja protoka krvi:

1. odmotajte prvi deo zavoja sa jastučićem;
2. stavite jastučić na ruku na mestu gde ste izvukli iglu;
3. obmotajte zavoj oko ruke održavajući neophodnu zategnutost kako biste osigurali hemostazu i fiksiranje;
4. uverite se da zavoj nije previše zategnut kako ne biste oštetili fistulu;
5. skinite zaštitni papir sa gipsa i postavite ga na zavoj kako biste ga pričvrstili za ruku.

