

OPIS

SOVAN[®] je upijajuća podloga sa nelepljivim filmom koji oslobađa jone srebra i postavljena je na hipoalergenou prozračnu lepljivu podlozi koja dolazi u dve verzije:

- od netkanog materijala (NW)
- od providnog vodootpornog poliuretanskog (PU) filma

PREDVIĐENA UPOTREBA


- Kompresivno hemostatsko dejstvo na arteriovenske fistule
- Zadržavanje eksudata po završetku dijalize, intravenskih terapija, transfuzije krvi.
- Zaštita vaskularnog pristupa u periodu nakon tretmana.

NAMENA

- Film koji oslobađa jone srebra garantuje trenutnu i dugotrajnu antibakterijsku efikasnost i pomaže smanjenje rizika od infekcije.
- Smanjuje znake upale koji su povezani sa ponovljenom venepunkcijom, kao kod arteriovenskih fistula (AVF).
- Sprečava formiranje eshara i čini sledeću venepunkciju manje traumatičnom za pacijenta.
- Posebno pogodno za previjanje AVF-a koje su nastale metodom punkcije „rupica za dugme“.
- Podstiče regeneraciju kože.
- Model sa vodootpornom folijom štiti vaskularni pristup od kontakta sa vodom.



Ekperimentalni dokazi antibakterijskog delovanja

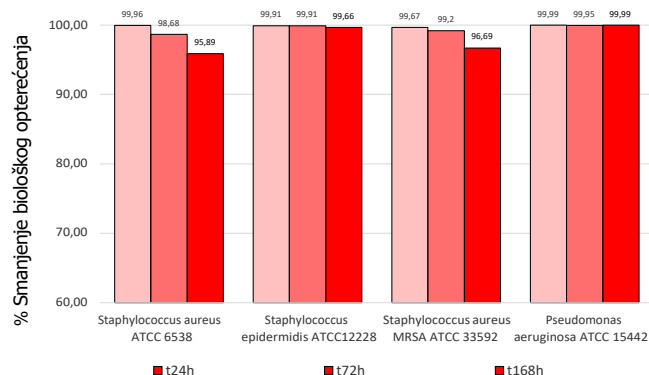

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Nakon uklanjanja igle i smanjenja protoka krvi:

1. uklonite polovinu zaštitnog papira sa flastera i stavite jastučić na ruku na mestu gde ste izvukli iglu;
2. zalepите samolepljivi deo na ruku pacijenta;
3. uklonite drugu polovinu zaštitnog papira i pričvrstite preostali deo flastera za kožu;
4. samo za model sa PU lepljivom podlogom, dovršite aplikaciju uklanjanjem zaštitnog papira na poleđini flastera

