

OPIS

SOVAN je visoko upijajući dvoslojni hemostatski jastučić na hipoalergenoj prozračnoj samolepljivoj podlozi. Pogodan je i za pacijente kojima je potrebna intravenska terapija i transfuzija krvi.

PREDVIĐENA UPOTREBA

Za kompresivno hemostatsko dejstvo, posebno za negu arteriovenskog pristupa nakon dijalize. Koristi se za hemostazu nakon uklanjanja igle iz fistule..

NAMENA

Dizajnirano da zaustavi krvarenje i smanji rizik od hemoragije zahvaljujući kompresiji na mestu uboda. Takođe deluje i kao barijera protiv rizika od infekcija. Biokompatibilni sloj se ne lepi za kožu, čime se izbegava skidanje ugruška i rizik od ponovnog krvarenja.

Lepak pomaže da jastučić ostane na mestu.

Flaster za fistule sa jastučićem

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



1 Uklonite zaštitni papir i postavite prvu polovinu flastera na kožu.



2 Stavite jastučić preko mesta uboda, pritisnite i izvucite iglu.



3 Uklonite drugu polovinu papira i čvrsto pričvrstite drugu polovinu flastera na kožu. Ostavite na mestu primene do postizanja hemostaze

